

遊び感覚で楽しくリハビリ まとあてスロー



Largocare



まとあてスローの特長

ボールを投げて楽しく遊ぶことで自然に全身運動ができ、同時にゲーム感覚で脳トレも行うことができるレクリエーション製品です。

スタンド型 (MAS-HNCA)

1台で4種類の
まとあてが楽しめます!!

1

折畳んで収納が可能な
スタンド型

省スペースに折畳んで
収納ができます。

2

スクリーン

ループ式になっているので、
各々の面で2種類の絵柄を
入れ換えることができます。



動物 (数字)

3

1台にボール6個付



サークル (数字)



数字 (16マス)



ひらがな (49マス)

まとあてスローの使用方法

スタンド型 (MAS-HNCA)

まとあてスロースタンド型を使用する際は、スタンドフレームを完全に開き 平らな床に置いて使用してください。



← スタンドフレームを
閉じた状態




← スタンドフレームを
開いた状態

スタンド型のスクリーンはループ式になっているので、各々の面で2種類の絵柄を入れ換えることができます。



ひらがな:49マス

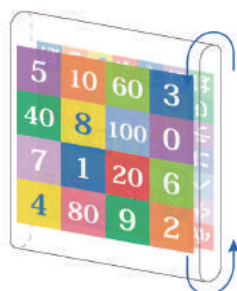


数字:16マス



数字:サークル



数字:動物

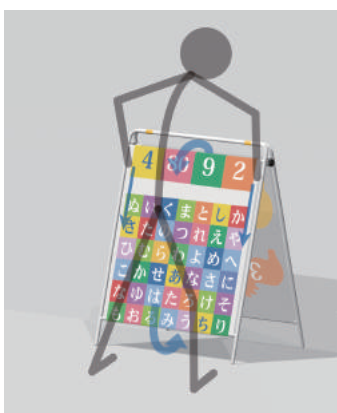

スクリーンの両端を持って
下の方にずらしします。



これを何度か繰り返して
絵柄を入れ替えます。

ボールを投げる際は周囲の人の迷惑にならないよう 十分にご配慮ください。
スクリーンに付かず跳ね返ったり、スクリーンから外れて周りに飛んでゆく場合もございますので ご注意願います。

まとあてスローの楽しみ方

「動物」 (数字)

を使った楽しみ方



- ① 好きな動物の絵を狙って投げる
- ② 当たった動物の数字の大小を競う
- ③ 当たった動物の名前を声に出す



「サークル」 (数字)

を使った楽しみ方



- ① 狙った数字に当てる
- ② 大きい数字（または小さい数字）に当てる
- ③ 当てた数字の足し算などをする
- ④ 複数人で投げて合計数字を競う
- ⑤ 当てた色と同じ色の好きな食べ物を声に出す

「数字」 (16マス)

を使った楽しみ方



- ① 狙った数字に当てる
- ② 大きい数字(または小さい数字)に当てる
- ③ 当てた数字の足し算などをする
- ④ 複数人で投げて合計点数を競う
- ⑤ ひとりで記録をつけて合計数字の変化を楽しむ

「ひらがな」 (49マス)

を使った楽しみ方



- ① 狙った文字に当てる
- ② 当たった文字で「言葉ゲーム」をする
(例えば: 「え」に当たったら「えんぴつ」と答えます。)
- ③ 自分の「名前」や「物」「趣味」などを順番に文字をひろうように当てて他の利用者に伝える

利用者の声

- いろいろなパターンがあって 楽しい
- どこに投げてでも貼り付くから行いやすい
- 点数が書いてあるからやる気がでる
- 立ちながらも 座りながらも 楽しめる



スタッフの声



- 座位でも立位でも使用できる
- バランスの練習になりそう
- 場所が移動できるのがよい
- 的の種類が豊富でよい
- 目標があるので 利用者の意欲がでる

事業者のメリット

- リハビリ現場でのスタッフの負担を軽減し 利用者の評判が向上します
- 多用途の訓練用具として 様々な利用者に使用していただけます
- 個別訓練、集団レクリエーションなどで利用することができます
- 場所を選ばず利用できます

商品ラインナップ



まとあてスロースタンド型
(MAS-HNCA)



※『まとあてスロースタンド型』は 4面で1 セットです。

品 番	品 名	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	付属品
MAS-HNCA	まとあてスロースタンド型 (4面)	W940 H1200	7.3	ボール 6個

販売店

産学共同研究・開発



国立大学法人 浜松医科大学附属病院
リハビリテーション科・作業療法部門

製造元・お問い合わせ先



株式会社 共臨社

〒422-8058 静岡市駿河区中原569番地
TEL 054-281-1166 / FAX 054-281-8096
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品デザインは予告なく変更することがあります。
- 本体価格の他、配送・設置調整費、工事費等が別途必要です。

このカタログの掲載内容は
2021年2月現在のものです。